

COLLAR INFLABLE

**DE RECUPERACIÓN PARA  
PERRO, COLLARES AJUSTABLES**



SANGKEE MÉXICO.

AV.PASEO DE LA REFORMA #199, COL. RENACIMIENTO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO,

C.P. 06500. TEL: (52) 557597-2591 y (52) 55 7597-2592



**01**

Collar inflable de recuperación para perro, collares ajustables de recuperación de gatos para gato y perro, cómodo collar isabelino después de la cirugía para perros medianos para evitar mordeduras y arañazos

**02**

El collar inflable está diseñado para proteger a tus mascotas de lesiones, erupciones y heridas postoperatorias, evitará que las mascotas muerdan y laman su zona lesionada o quirúrgica y promover la recuperación de cirugía o heridas.

**03**

Hay una correa de velcro en la apertura del collar, que te permite ajustar la tensión del collar de perro alrededor del cuello de tu perro para el ajuste perfecto.

Collar de recuperación inflable, se puede desinflar y almacenar en un pequeño espacio cuando no lo utilices y hay una apertura de cremallera en un lado, puedes sacar la bolsa y lavar la tela exterior.

Interior de PVC inflable y exterior suave de material de felpa agradable al tacto que permitirá que tu perro lo use cómodamente y no bloquea la visión de tu mascota. Tu perro no se sentirá oprimido o nervioso cuando lleves este collar de cono de perro, puede comer, beber, dormir y jugar normalmente.

Apto para dermatología/cirugía, belleza, bañera. No afecta a la visión periférica de tu perro ni a la capacidad de comer y beber. Pueden existir diferencias de medición. El tamaño recomendado es solo una sugerencia, no es una garantía de ajuste, ya que cada perro es diferente.

Tallas:

S: circunferencia del cuello de 18-30 cm.

M: circunferencia del cuello de 25-36cm.

L: circunferencia del cuello de 38-50cm.

Vea la sexta imagen para más detalles.

¿Cómo utilizar?

1. Pellizque y sople para inflar el collar a través de la válvula de aire, por favor, tire de la cremallera antes de inflar, infla hasta que se sienta 80% – 90% llena.

2. Inserta el collar diario de tu mascota a través de los anillos internos del cono para asegurar la dona en su lugar.

3. Coloque el cono en su mascota y pegue la correa que debe colocarse en la parte posterior del cuello y luego ajuste para un ajuste perfecto.

4. Pellizque el puerto de la válvula de inflado para desinflar más rápido cuando se desinfla después de su uso, fácil de almacenar.

5. Retira y lava la funda según sea necesario; simplemente frota la superficie de la cubierta suavemente, fácil de limpiar.

IMPORTANTE:

1. Siempre vigile a una mascota después de la cirugía para asegurarse de que el collar funciona correctamente.


2. Diseñado para uso exclusivo de mascotas. No está destinado a ser utilizado como dispositivo de flotación.


3. Algunos perros pueden sentirse incómodos si es la primera vez que usas el collar inflable, pueden tratar de quitarlo con sus patas traseras, por lo que recomendamos que se enganchen las uñas de la mascota o se pongan calcetines.



SANGKEE  
MÉXICO



 Paseo de la Reforma #199, Piso 10. Col. Renacimiento.  
Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX. C.P. 06500

 +52 5522901165

 [www.sangkee.mx](http://www.sangkee.mx)